



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ГЕЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

# JOLLI\*

## Gel

Арт. F-00073



Гелевые защитные вкладыши от натоптышей JOLLI предназначены для защиты подошвенной части переднего отдела стопы в области плюснефаланговых суставов при натоптышах, мозолях и трещинах. Мягкая рельефная поверхность гелевых вкладышей эффективно предотвращает скольжение стоп в обуви и существенно повышает комфорт при ходьбе.

### СВОЙСТВА ТОВАРА

Гелевые вкладыши применяются при:

- травмах и деформациях плюснефаланговых суставов;
- натоптышах, мозолях, трещинах, потертостях в основании пальцев стопы;
- поперечной распластанности стоп;
- начальной и средней степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

размещаются в обуви в области плюснефаланговых суставов.

### ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- защищает от контакта с обувью;
- эффективно смягчают кожу в области контакта с гелем;
- защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок практически в любом типе модельной обуви.

### ОГРАНИЧЕНИЯ:

не использовать при открытых, кровоточащих и молющих ранах.

### СОСТАВ:

гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют размягчению мозолей.

### УХОД:

вкладыши моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Изделия из геля могут повторно использоваться после мытья или очистки.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

2 шт. в упаковке.

### РАЗМЕР:

универсальный.

\* Товар не является медицинским изделием и не подпадает под обязательную сертификацию.