



KINERAPY

ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мяч гимнастический KINERAPY GYMNASTIC BALL



Сертификат соответствия № РОСС DE.АГ81.Н05523 (с 26.06.2017 г. по 25.06.2018 г.) выдан ООО «Бирюза».

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

Изготовитель: Рехард Технолоджис GmbH, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru

Арт.: INTKK-RB-N5_11/17

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами изделие произведено в соответствии с директивами ЕС и Германскими стандартами, обеспечивающими высокое качество и безопасность эксплуатации. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных полимерных материалов с использованием биоластикатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.


**Мяч гимнастический
KINERAPY GYMNASTIC BALL**

Диаметр: 55 см, 65 см, 75 см

Область и способ применения:

Мячи KINERAPY GYMNASTIC BALL предназначены для выполнения гимнастических упражнений и динамических игр, а также могут использоваться в качестве нестабильной платформы для сидения.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Мячи выдерживают нагрузку до 250 кг.

Все мячи KINERAPY GYMNASTIC BALL изготовлены по технологии Burst-Proof (100 кг), обеспечивающей безопасность в случае прокола мяча. Если в момент прокола нагрузка мяча не превышает 100 кг и мяч накачан воздухом так, что размер не превышает диаметр, указанный на мяче, то в момент прокола мяч не разорвётся мгновенно, а будет постепенно сдуваться, давая возможность пользователю безопасно встать с мяча и тем самым, предотвратить падение и возможные травмы.

Рельефные линии на поверхности служат для удобства удержания мяча в руках и лучшей сцепляемости материала с поверхностью.


Правила подбора:

Для эффективного использования мяча рекомендуется выбирать мяч такого диаметра, чтобы при сидении на мяче угол в коленных суставах составлял 90 градусов. Возможен подбор размера мяча в зависимости от роста:

При росте до 165 см – мяч диаметром 55 см, при росте от 165 см до 178 см – мяч диаметром 65 см, при росте свыше 178 см – мяч диаметром 75 см.

Правила использования:

Накачайте мяч с помощью насоса KINERAPY BALL PUMP (приобретается отдельно). Во избежание переполнения мяча воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей.

Мяч необходимо наполнять воздухом не более рекомендованного диаметра, указанного на мяче. В комплект к мячу входит измерительная лента для контроля размера мяча.

Во время накачивания мяча периодически проверяйте диаметр мяча. И при дальнейшем использовании мяча поддерживайте наполненность воздухом так, чтобы диаметр мяча соответствовал указанному размеру.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Состав: ПВХ.

Комплектность:

Мяч, две заглушки, измерительная лента для контроля диаметра, инструкция.

Правила ухода:

Мячи очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:

В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ МЯЧ. Отремонтированный мяч не гарантирует безопасность использования.

Правила хранения:

Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок:

Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности:

Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.