

## Бандаж-трусы ортопедические при опущении органов малого таза ОВО-445

### Особенности:

- эластичная ткань с высоким содержанием хлопка
- отстегивающаяся ластовица
- плотный пелот в кармашке в нижней части живота
- пелот в паховой области
- поддерживающая часть на крючках
- цвет: бежевый, черный

### Показания к применению:

- опущение и выпадение органов малого таза
- после операций на органах малого таза
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

### Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено.
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
  - синдром портальной гипертензии
  - наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
  - аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

### Рекомендации:

ручная стирка при t 30° С, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку



размер	0	1	2	3	4	5	6	7
обхват бедер (см)	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

### Инструкция по применению:

- подобрать по размеру для плотной посадки
- надеть изделие
- разместить пелот в кармашке до самого низа
- застегнуть поддерживающую часть

### Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

### Состав:

- хлопок - 52%
- вискоза - 26%
- эластан - 22%

### Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

### Рекомендации по уходу

